

STERISEPT READY TO USE

Tekutý dezinfekční přípravek bez obsahu alkoholů k rychlé dezinfekci malých ploch a předmětů zdravotnických prostředků

Sterisept ready to use je rychlý dezinfekční prostředek bez obsahu alkoholů, aldehydů a PHMB, na plochy a povrchy zdravotnických prostředků citlivých na alkohol. Perfektní produkt, kde je vyžadována rychlá a pravidelná dezinfekce. Lze použít na všechny voděodolné povrchy. Díky speciálnímu složení má vynikající kompatibilitu s různými druhy materiálů a dobré čisticí vlastnosti.

Oblast použití:

K rychlé dezinfekci malých ploch a předmětů zdravotnických prostředků citlivých na alkohol. Vysoká kompatibilita s materiály a povrchy z nerezové oceli, skla, hliníku, mědi, mosazi, PVC, gumy, plastů, silikonu, akrylu a plexiskla

Zdravotnické zařízení.

Povrchy v okolí pacienta, jako jsou rámy postelí a noční stolky.

Vyšetřovací lehátka a matrace.

Inkubátory, vany a vozíky

Displeje, klávesnice a ovládací panely

JIP, Dialyzační centra.

Stomatologie

Laboratoře a diagnostika

Farmaceutický a kosmetický průmysl

Domovy sociální péče

Vhodný k dezinfekci do špatně dostupných míst

Použití:

Aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěrem. Dezinfekce postřikem:

Nastříkejte přípravek na povrchy ze vzdálenosti nejméně 30 cm a rozetřete textílií.

Nechte působit po expoziční dobu dle požadované mikrobiologické účinnosti.

Dezinfekce povrchu otřením:

Naneste dostatečné množství přípravku na netkanou textílií a povrchy otřete.

Složení:

Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 0,45 g

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,45 g

Účinnost:

baktericidní, levurocidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní,

virucidní, sporicidní

Balení: 1000 ml / 5000 ml

Zdravotnický prostředek tř. II b

Upozornění:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zlikvidujte obsah a nádoby v souladu s předpisy o nebezpečných odpadech nebo obalech a obalových odpadech.



CE
0537

