


CHIRANA T. Injecta

Chirana

Doporučené použití injekční stříkačky na jednorázové

použití

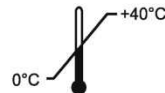

STERILIZOVÁNO




EO

Popis: Injekční stříkačky na jedno použití. Sterilní, netoxické, nepyrogenní.
Určeno pro: Aplikace tekutin do těla a odběr krve a tekutin z těla
Pro procedury FNA a FNNA doporučujeme používat trojdílné stříkačky CHIRANA.



1. Před použitím se ujistěte o neporušení sterility, celistvosti balení, číslu šarže a záruční době;
2. Injekční stříkačky použijte ihned po otevření balíčku, po použití zlikvidujte;
3. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, nebo vypršela doba platnosti;
4. Výrobek smí používat pouze kvalifikovaný lékař nebo zdravotník;
5. Pouze k jednorázovému použití. Celou sadu po jednorázovém použití zlikvidujte.
6. Toto zdravotnické zařízení neobsahuje ftaláty DEHP;
7. Opakovaná sterilizace nebo použití může způsobit infekci nebo křížové interakce.
8. Pokud se po naplnění stříkačky roztok zakalí, nebo dojde k odbarvení částic, okamžitě přestaňte používat, informujte výrobce a je-li to možné, vraťte stříkačku výrobci.

1. Otevřete balíček před použitím;
2. Před použitím zkontrolujte neporušenost každého balíčku. Nepoužívejte, pokud je obal natržen.
3. Každá použitá stříkačka je považovaná za kontaminovanou a po použití by měla být zlikvidována ve vhodné odpadní nádobě;
4. Bezpečné zacházení s výrobkem po jeho použití zabraňuje riziku infekce.

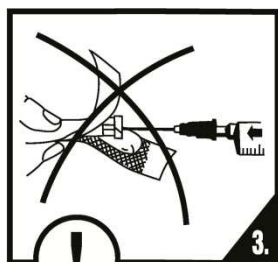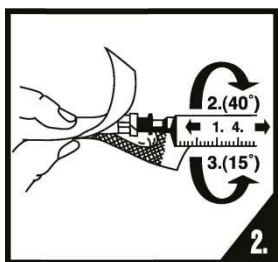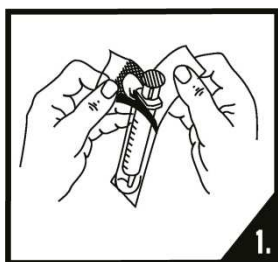

Upozornění



Viz návod k použití

Sériové číslo

Nepoužívejte opakovaně

Číslo šarže

Datum výroby

Použito

Sterilizováno etylenem

Výrobce

Bez použití pyrogenu



Bez použití DEHP



Bez použití PVC a



LATEXU



Nepoužívejte, je-li obal poškozen.

Chraňte před slunečním zářením,

na chladném a suchém místě

Křehké, zacházejte opatrně

CHIRANA T. Injecta, a.s.
Nám. Dr. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Slovensko
Tel.: +421/32/7709 991
Fax.: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com