

## HEBIX - mobilní zvedací židle



# Uživatelská příručka



## Contents

1. Příručka .....	1
2. Popis.....	1
3. Výrobce.....	1
4. Záruka.....	1
5. EG prohlášení o shodě .....	2
6. Použití.....	2
7. Specifikace .....	3
8. Příslušenství .....	3
9. Ikonky a symboly .....	3
10. Nesprávné použití.....	4
11. Bezpečnost .....	4
12. Čistění, desinfekce .....	7
13. Přeprava a uskladnění.....	7
14. Servisní středisko .....	7

## 1. Příručka

Tato příručka

- je nedílnou součástí zvedací židle HEBIX.
- musí být k dispozici po celou dobu používání výrobku.
- musí být předána kterémukoliv dalšímu uživateli.

## 2. Popis

HEBIX – mobilní zvedací židle, kód výrobku 7700000

## 3. Výrobce

aacurat gmbh  
Gottlieb-Daimler-Str. 9  
73460 Huettlingen  
Germany  
www.aacurat.de  
info@aacurat.de  
Tel. +49 (0)7361 921 920  
Fax +49 (0)7361 921 921

## 4. Záruka

2 roky od zakoupení



## 5. EG prohlášení o shodě

**aacurat**<sub>gmbh</sub>  
hilfsmittel für die alten- und krankenpflege

**EG-Konformitätserklärung**  
Declaration of EC-Conformity / Certificat de conformité CEE

**Produktbezeichnung:** HEBIX mobile Hebehilfe  
Product: HEBIX the mobile lifting chair  
Désignation du produit:

**Typ, Artikel- Nr.:** 7700000  
Type, code:  
Type:


**Hersteller:** aacurat gmbh  
Manufacturer: Gottlieb-Daimler-Str. 9  
Fabricant: D-73460 Hüttlingen , Germany

**Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Europäischen Richtlinien überein:**  
We herewith conform that the above mentioned product meets the requirements of the following standard:  
Le produit désigné ci-dessus est conforme à la ligne directrice européenne suivante :

EG-Richtlinie Medizinprodukte 93/42/EWG, Anhang VII  
Medizinprodukt der Klasse 1 ; medical device class 1 ; Dispositif Medical de Classe 1.

Hüttlingen, den 07.04.2015

Ort und Datum der Ausstellung  
Place and date of issue  
Lieu et date d'établissement

  
Geschäftsführer  
managing director  
Gestionnaire

## 6. Účel použití

**6.1** Židle HEBIX je pomocné zařízení sloužící ke zvednutí osoby z podlahy.

**6.2** Židli HEBIX lze použít jedině tehdy, pokud ležící osoba splňuje následující podmínky:

- je při vědomí
- musí být přístupná a vědoma si toho, že bude zvedána z podlahy
- musí být schopna samostatně sedět
- její stav musí umožnit zvedání a sezení

**6.3** Zajistěte zvednutou osobu v pozici vsedě před pádem ze židle (přidržením nebo oporou)

**6.4** Zvedejte židli HEBIX z pokleku se vzpřímenými zády

**6.5** Používejte HEBIX pouze pokud to dovoluje vaše fyzická kondice

# Uživatelská příručka

## HEBIX – mobilní zvedací židle

**6.6** HEBIX nesmí být používán za jiným účelem

**6.7** Před použitím židle HEBIX zkontrolujte:

- že nedošlo k vnějšímu poškození pohyblivých částí, madel nebo povrchu sedátka
- pevnost spojů
- že nechybí šrouby či matice

Pokud některá část chybí nebo je poškozena, židle nesmí být používána.

**6.8** Židle HEBIX smí být použita pouze na rovné horizontální podlaze.

## 7. Specifikace

Rozměry v mm

Zatížení:  
max. 100 kg




Váha:  
10.5 kg

Materiály:  
Ocel/hliníkový nástřík  
Sedátko - Polystone®


## 8. Příslušenství

Skladovací taška  
Výrobek č. 7700001

## 9. Ikony a symboly

-  Nahlédněte do příručky
-  datum výroby
- REF** číslo v katalogu
- SN** výrobní číslo
- CE** označení dle 93/42/EWG
-  Nebezpečí přiskřípnutí

Složená

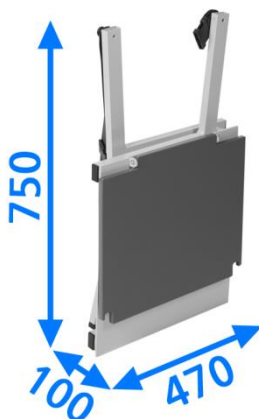

Rozložená



Carry bag  
Article- No. 7700001

# Uživatelská příručka

## HEBIX – mobilní zvedací židle

### 10. Nesprávné použití

10.1 Židle HEBIX smí být použita výlučně k účelům popsáným v této příručce!

10.2 Je zakázáno použít židli HEBIX za jiným účelem

10.3 HEBIX nesmí být trvale požitá místo křesla


10.4 HEBIX nesmí být použita jako stupínek /žebřík)

### 11. Bezpečnost

HEBIX smějí používat pouze osoby které jsou seznámeny a porozuměly této příručce. Nesmějí ji používat osoby u kterých by mohlo evidentně dojít k poškození jejich zdraví.

#### 11.1 Rozložení židle HEBIX

Židli HEBIX rozložte dle obrázků 1 a 2., zvedněte sedátko a zaaretujte do bočnic – viz obr. 3. Zádové opěrky se zasouvají až teprve pod ležící osobu. Dbejte na správné barevné označení, zádových opěrek – viz detail.

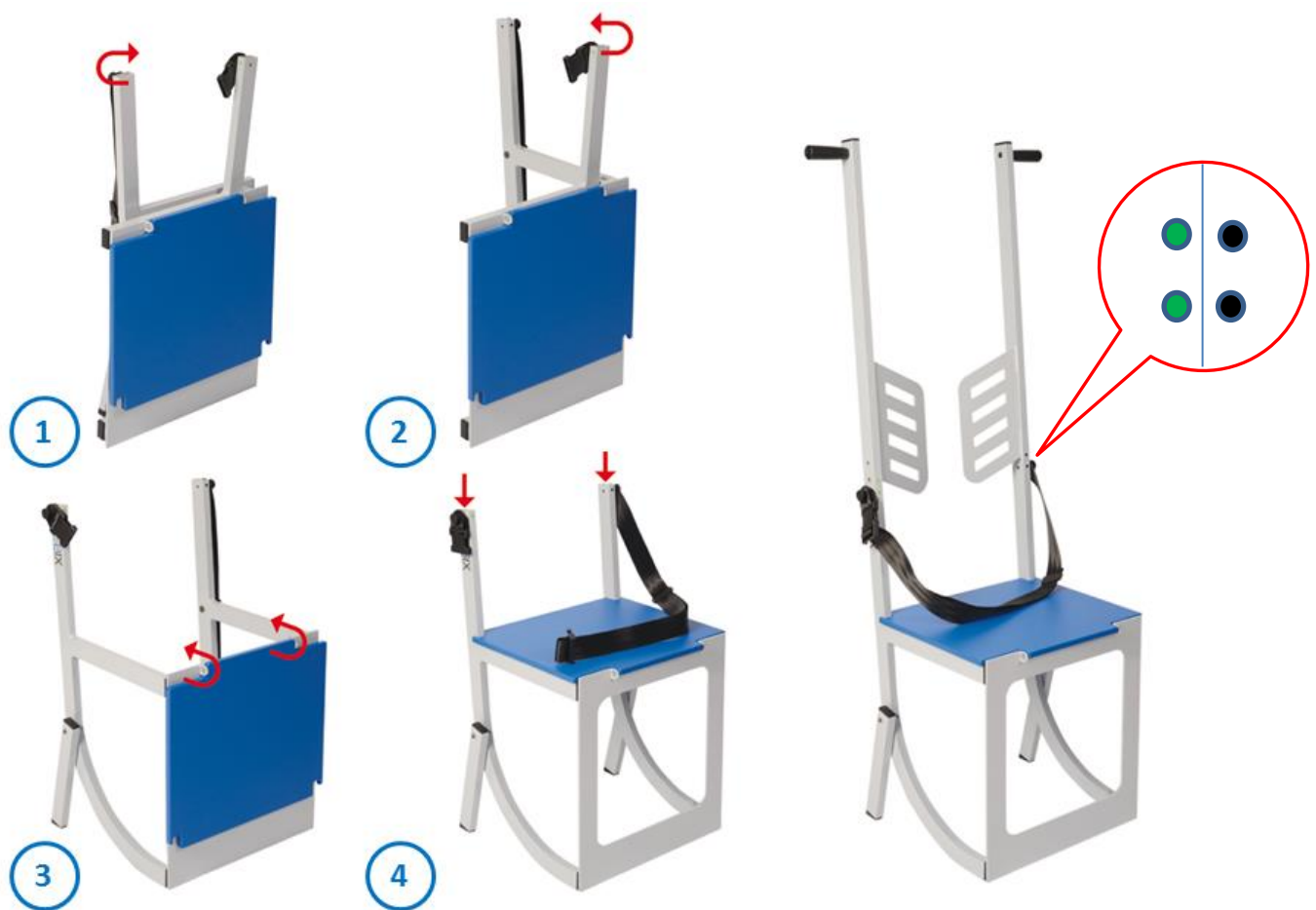

Dávejte pozor aby nedošlo k přiskřípnutí oděvu či prstů

# Uživatelská příručka

## HEBIX – mobilní zvedací židle

### 11.2 Použití židle HEBIX

Osobu, kterou budete zvedat, otočte na záda. Zdvihněte jí nohy a zasuňte židli jak je znázorněno na obrázcích.



Opatrně zasuňte jednu po druhé zádové opěrky pod ramena a do bočnice až uslyšíte zacvaknutí a zámek je ve správné pozici.



Před zasunutím zádové opěrky do bočnice je třeba ji položit rovně na podlahu. Pro zasunutí je pohodlnější když bočnici přišlápnete aby se neposouvala – viz obrázky



# Uživatelská příručka

## HEBIX – mobilní zvedací židle

Nazvedněte ležícímu hlavu a zasuňte podhlavní opěrku do odpovídající polohy (viz obrázek dole vlevo).



Připevněte bezpečnostní pás jak je na obrázku vpravo..

### 11.3 Zvedání pomocí židle HEBIX

Dřepnete si a uchopte držadla jak je ukázáno na obrázku. Zvedejte opatrně silou nohou a nikoliv zády. Než začnete zvedat je třeba se ujistit že osoba sedí bezpečně a nemůže spadnout na bok či dopředu.



Dávejte pozor abyste si neporanili paty nebo nártý

### 11.4 Postavení židle HEBIX

Jakmile postavíte židli do vertikální polohy, tak se automaticky uvolní podpůrné nožičky (je třeba se přesvědčit, že jsou ve správné poloze). Nyní se můžete věnovat ošetřované osobě.

# Uživatelská příručka

## HEBIX – mobilní zvedací židle



### **Bezpečnostní poznámka:**

Osobě pomáhejte vstát nebo přesouvat pouze je-li to bezpečné

### **11.5 Bezpečnostní pokyny**

Pro bezpečné používání je nezbytné provádět vizuální kontrolu a test jak je popsáno v kapitole 6.7 této příručky před každým použitím.

## **12. Čistění, desinfekce**

Pro čistění lze použít komerční nekorozivní prostředky. Povrch lze čistit suchým nebo mokřým hadříkem, Nepoužívejte vysokotlakové nebo parní čističe. K desinfekci povrchu lze použít běžné desinfekční prostředky.

## **13. Přeprava a skladování**

Pro přepravu a skladování používejte transportní tašku nebo kartonovou krabici. Skladujte v suchém místě.

Skladovací podmínky:           teplota -20 °C to +70 °C  
  max. vlhkost 85 %

## **14. Servis**

Servis zajišťuje APOS BRNO Kotlanova 3, 628 00 Brno, tel. 541 217 820, info@aposbrno.cz

### Zasunutí zádové opěrky do bočnice

Před zasunutím zádové opěrky do bočnice je třeba ji položit rovně na podlahu. Pro zasunutí je pohodlnější když bočnici přišlápnete aby se neposouvala – viz obrázky

